

Der flexible Hautschutz und Sekundärverband



Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch

Produktgruppierung

Hydrokolloidverband
Primärverband und Sekundärverband

Zusammensetzung

Wundkontaktschicht:
Dreifach-Hydrokolloidmatrix,
bestehend aus Natriumcarboxymethyl-
cellulose, Pektin, Gelatine

Äußere Schicht:
Polyurethan-Film

Indikation

Primärverband für alle trockenen bis feuchten, akuten und
chronischen Wunden

VARIHESIVE® Extra dünn eignet sich im Speziellen für:

- Hautabschürfungen
- Schnittwunden
- Hautrisse
- Hautschutz, z.B. Intertrigoprophylaxe

VARIHESIVE® Extra dünn eignet sich als Sekundärverband
in Kombination mit AQUACEL® Extra™, AQUACEL® Ag
Extra™ und KALTOSTAT®.

Wirkungsweise

- Bei Kontakt mit Wundexsudat kommt es zur Bildung
eines Gels, das ein optimales, feuchtes Milieu für die
Wundheilung schafft und die körpereigene Autolyse
unterstützt.
- Die Dreifach-Hydrokolloidmatrix geliert in unterschied-
licher Geschwindigkeit. (> Abb. 1)
- Der Polyurethan-Film gewährleistet eine zuverlässige,
wasserdichte Bakterien- und Virenschranke. (> Abb. 1)


Produktnutzen

- dünn, flexibel und anschmiegsam
- ideal als Sekundärverband zum Fixieren
- Die Dreifach-Hydrokolloidmatrix geliert in unterschiedlicher Geschwindigkeit, so dass ein dynamisches, gleichzeitig aber über längere Zeit beständiges System für die Aufnahme von Wundexsudat entsteht.
- klinisch nachgewiesene Barriere gegen schädliche Bakterien und Viren, wie z. B. MRSA, Hepatitis-B-Virus und HIV-1
- schafft ein feuchtes Wundheilungsmilieu und fördert die Autolyse, wie in zahlreichen klinischen Studien nachgewiesen

Handhabung

- Um eine gute Haftung von VARIHESIVE® Extra dünn zu gewährleisten sollte der Verband mindestens 3 cm über den Wundrand bzw. den darunter verwendeten Primärverband hinaus appliziert werden.
- Ab 3 mm Wundtiefe sollte ein Wundfüller, z. B. AQUACEL® Extra™, AQUACEL® Ag Extra™ oder KALTOSTAT® verwendet werden.

Weitere Informationen zur Anwendung von VARIHESIVE® Extra dünn und zu möglichen Kontraindikationen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

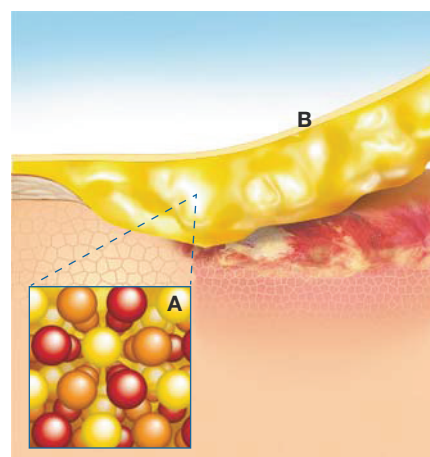

1_ Aufbau:

A Dreifach-Hydrokolloidmatrix für eine kontrollierte Absorptionsrate

B Bakterien- und Virenschranke



Bestellinformationen				D	A	CH	
Handelsform	Packungs-inhalt	Außengröße/ Gewicht	Wundkissen	Art.-Nr./ PZN	Art.-Nr.	Art.-Nr. REF	Pharma- code
	5 Stück	7,5 x 7,5 cm		038 926 48	389 26 48	187 951	140 71 23
	5 Stück	10 x 10 cm		038 926 54	389 26 54	187 954	140 71 52
	5 Stück	15 x 15 cm		038 926 60	389 26 60	187956	140 71 69
	10 Stück	5 x 10 cm		038 926 77	389 26 77	187 959	140 71 46
	10 Stück	5 x 20 cm		038 926 83	389 26 83	187 961	140 71 75
	10 Stück	9 x 15 cm		016 708 20	187 920	187 920	270 20 48
	10 Stück	9 x 25 cm		016 708 37	187 921	187 921	270 24 62
	10 Stück	9 x 35 cm		016 708 43	187 922	187 922	270 24 79
oval	5 Stück	10 x 15 cm		068 699 28	–	–	–