

Beschriftung

Die praktischen Etiketten und der Dispenser Marker helfen Ihnen, Fehler bei der medikamentösen Therapie zu vermeiden. Je besser Ihre MediDispenser beschriftet sind, desto einfacher wird die Einnahme.

07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00
12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00
22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00
				20:00		24:00

Name/nom: Petra Roth
 Adresse: Im Rietwald 25, 8424 Embrach
 Arzt/médecin: Dr. Walter Krauer, Tel. 044 865 38 96
 Datum/date: 22.3.08, 22.3.08, 05.4.08, 05.4.08, 05.4.08
 Med.: Supradyn Kps., Gynotardiferon Drg., Co-Eunatec 20mg, Amlodipine 5mg, Betasero 16mg (in Reserve)

Med.	1	2	3	4
Supradyn Kps.		X		
Gynotardiferon Drg.		X		
Co-Eunatec 20mg	X			
Amlodipine 5mg	1/2	1/2		
Betasero 16mg (in Reserve)	1/2	1/2		

Besonderheiten/remarques spéciales:
 Gynotardiferon 30 Minuten vor dem Frühstück einnehmen

Etikette für die Verschreibung des Arztes.

MORGEN	MITTAG	ABEND	NACHT	RESERVE
MORGEN	MITTAG	ABEND	NACHT	RESERVE
MORGEN	MITTAG	ABEND	NACHT	RESERVE
MORGEN	MITTAG	ABEND	NACHT	RESERVE
MORGEN	MITTAG	ABEND	NACHT	RESERVE
MORGEN	MITTAG	ABEND	NACHT	RESERVE
MORGEN	MITTAG	ABEND	NACHT	RESERVE
MORGEN	MITTAG	ABEND	NACHT	RESERVE
MORGEN	MITTAG	ABEND	NACHT	RESERVE
MORGEN	MITTAG	ABEND	NACHT	RESERVE



Beschriftung mittels dem Dispenser Marker kann mit dem integrierten Radiergummi wieder gelöscht werden.

Bestellen Sie unsere Medikamentenverteilsysteme auch in unserem OnlineShop unter www.wiegand.ch



Firmenstempel:

Distributed by **puras**
 031 996 85 85
 puras.ch

Wiegand AG
 Schlosserstrasse 5
 CH-8180 Bülach
 Tel.: +41 44 872 74 74
 wiegand@wiegand.ch
 www.wiegand.ch

- Nicht hochkant lagern oder transportieren
- Nicht geeignet für den Transport in der Handtasche
- Nicht geeignet für den Transport im Rucksack

WeekBox

WeekBox Set XXL-Flex

Das ideale Hilfsmittel für die korrekte Einnahme Ihrer Medikamente



otc.600.201.171.2003.de

WeekBox Set XXL-Flex

Das ideale Hilfsmittel für die korrekte Einnahme Ihrer Medikamente

Platzieren Sie Ihre Medikamente in den richtigen Fächern (Einnahmezeitpunkt). Mit 7 flexibel einsetzbaren Teilern können bis zu 8 Einnahmezeiten definiert werden. Das Anbringen der Etiketten oder Beschriften mit dem Dispenser Marker hilft, die richtigen Abgabezeiten zu bestimmen.

Der transparente Schiebedeckel hilft Ihnen, die Einnahmehinfolge einzuhalten, da er sich nur in eine Richtung öffnet. Die faltbare und leicht zu reinigende Wochenbox ist ideal, um Ihre sortierten Medikamente für eine ganze Woche übersichtlich aufzubewahren.

Die WIEGAND[®] WeekBox eignet sich für die Aufbewahrung der Medikamente und ist nicht für den Transport geeignet. Sollten Sie für Reisen eine geeignete Alternative benötigen, empfehlen wir Ihnen die WIEGAND[®] WiBox pro. Diese erfüllt alle Kriterien für den sicheren Transport von gerüsteten Medikamenten, auch im einzeln verriegelbaren Tagesdispenser.



WIEGAND[®] WiBox pro
Art. Nr.: 230.00.01.de-1

Lieferumfang: WeekBox Set XXL-Flex

- Faltbare Wochenbox für MediDispenser
- 7 grosse MediDispenser 171 (9.8 x 26 cm)
- 7 x 7 Teiler für flexible Fachgrößen
- Etiketten zur Markierung der Abgabezeiten
- Dispenser Marker

Art. Nr.: 600.201.171.de-1



Die WIEGAND[®] WeekBox lässt sich einfach reinigen und ist bei richtiger Pflege langlebig. Unsere Material- und Pflegehinweise finden Sie unter www.wiegand.ch

Habe ich mein Medikament heute schon genommen?

- Müssen Sie mehrmals am Tag ein Medikament einnehmen?
- Nehmen Sie Ihre Medikamente vor allem zu den Mahlzeiten ein?
- Vergessen Sie ab und zu, ein Medikament einzunehmen?
- Benötigen Sie Brausetabletten oder andere, grosse Medikamente?

Die WIEGAND[®] WeekBox für die Sortierung der Medikamente für eine Woche bringt eine enorme Erleichterung.