



AutoProtect™
PRO

Découvrez la double protection.



mylife AutoProtect PRO – l'aiguille qui ne pique que lorsque c'est nécessaire.

- Le mécanisme de verrouillage au niveau des deux extrémités de l'aiguille permet d'éviter tout risque de piqûre accidentelle
- Canule à paroi extra fine pour un écoulement optimal du médicament¹
- L'aiguille de sécurité à visser pour stylos injecteurs est compatible avec toutes les grandes marques de stylos injecteurs²
- Soutient le respect des exigences de la directive UE 2010/32 §4, art. 73 et du règlement européen sur les dispositifs médicaux.

AUTOPROTECT™ PRO





Liberté. Confiance. Avec mylife.



MTD
Medical Technology and Devices



AutoProtect™
PRO

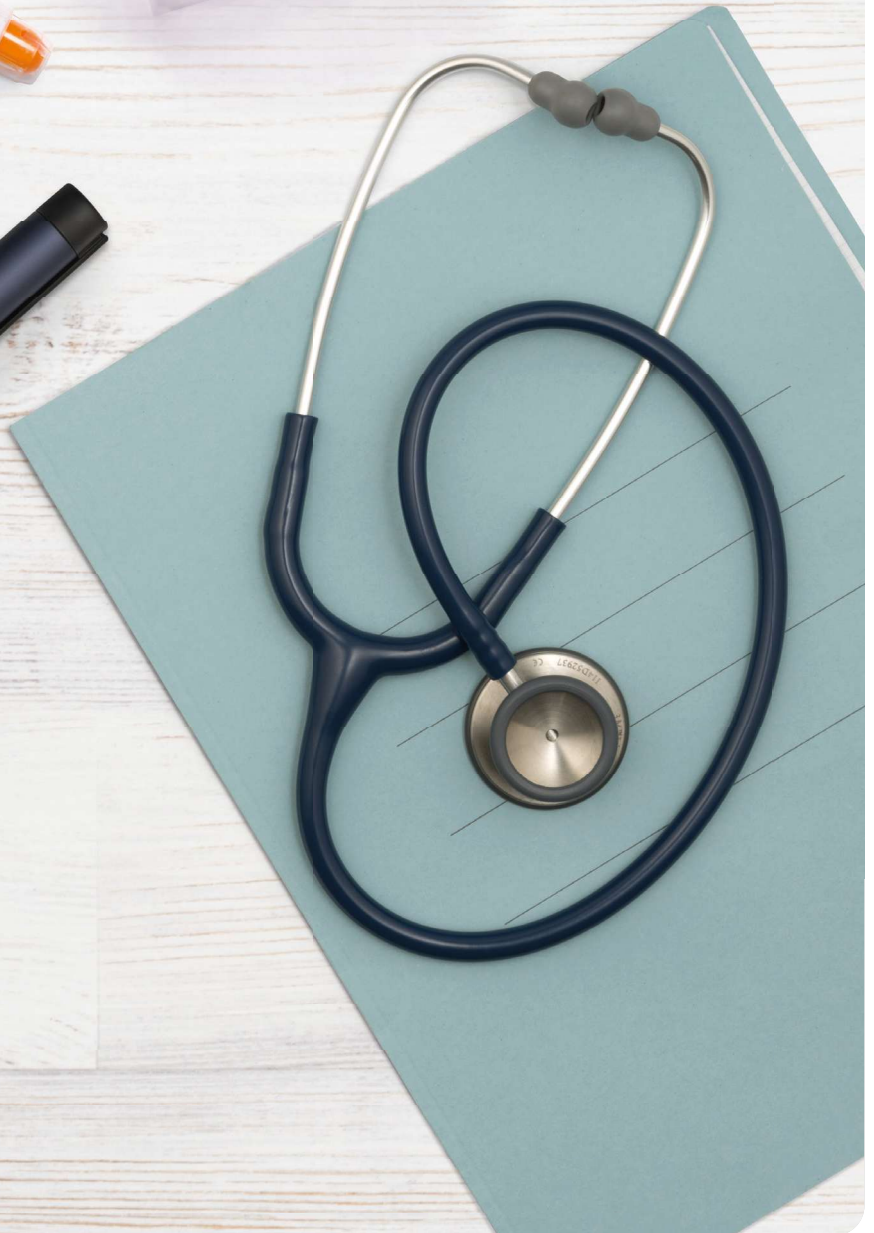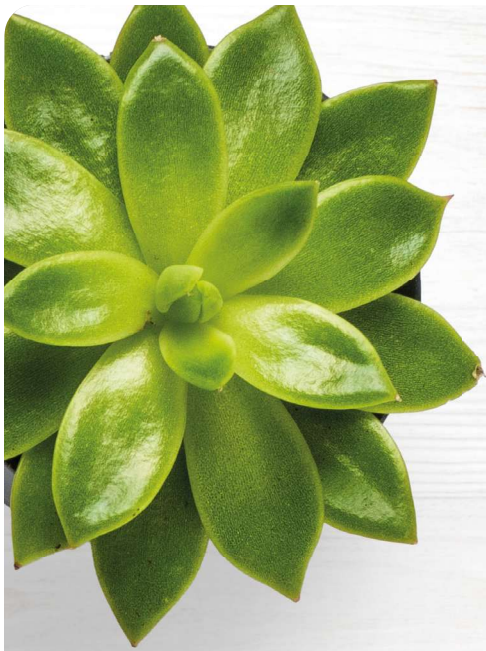





mylife AutoProtect PRO

Aiguille sécurisée pour stylos injecteurs avec double protection

Grâce à son système de verrouillage innovant, l'aiguille sécurisée pour stylos injecteurs mylife AutoProtect PRO minimise le risque de blessures par piqûre d'aiguille.


- Le mécanisme de verrouillage au niveau des deux extrémités de l'aiguille permet d'éviter tout risque de piqûre accidentelle
- Le mécanisme d'aiguille sécurisée totalement intégré se verrouille automatiquement immédiatement après l'injection
- L'indicateur rouge de verrouillage montre que l'aiguille est verrouillée et empêche une réutilisation
- L'extrémité visible de la canule facilite la purge
- Soutient le respect de la directive 2010/32/UE §4, art. 73 – Prévention des blessures causées par des instruments tranchants/piquants dans le secteur hospitalier et de la santé.

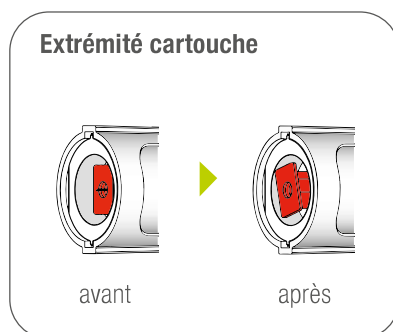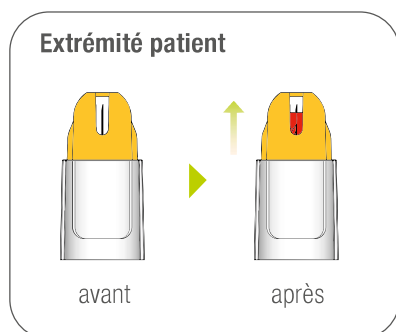

Canule à paroi extra fine

Pour un écoulement optimal du médicament¹

Diamètre interne plus large pour un diamètre externe inchangé⁴

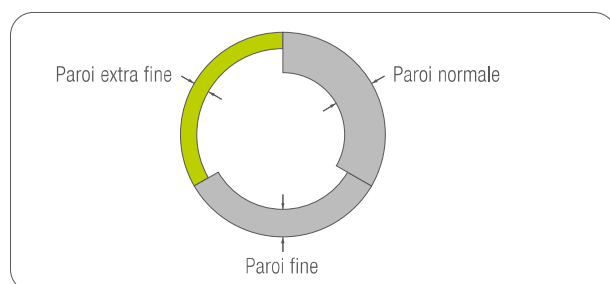

- Amélioration du traitement grâce à un écoulement plus rapide¹
- Le diamètre interne plus large de la canule permet d'appliquer moins de force sur le bouton d'injection¹
- Permet l'administration simple d'insuline très concentrée, à partir de 200 et 300 Unités/ml



AutoProtect™
PRO

Travaillez en toute sécurité.





Sélectionnez la longueur d'aiguille adaptée pour vos patients

Codage couleurs facilitant la distinction des longueurs d'aiguille

L'aiguille sécurisée pour stylos injecteurs mylife AutoProtect PRO est disponible en deux longueurs différentes: 5 mm et 8 mm. L'aiguille de 5 mm peut être utilisée sans recourir à la technique du pli cutané, ce qui minimise ainsi le risque de piqûre accidentelle pour le personnel soignant lors d'une injection.⁵



5 mm, 31G/0,25 mm



8 mm, 29G/0,33 mm




Présentation des produits

PZN	N° réf.	Description	Diamètre de la canule	Quantité
DE: 18227721 AT: 5683452	700021817	mylife AutoProtect PRO 5 mm	31G/0,25 mm, paroi extra fine	100 pcs
DE: 18227738 AT: 5683469	700021818	mylife AutoProtect PRO 8 mm	29G/0,33 mm, paroi extra fine	100 pcs




mylife AutoProtect PRO


Mode d'emploi

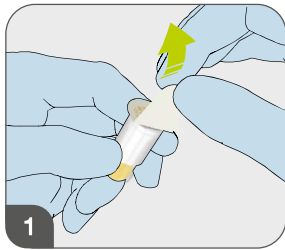


1 Retirer le film étanche de l'aiguille sécurisée.

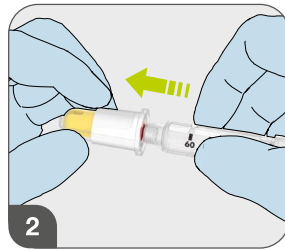


2 Insérer horizontalement le stylo dans l'aiguille.

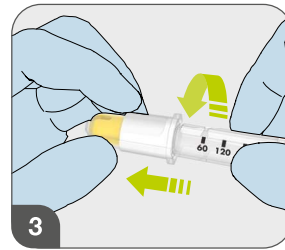


3 Fixer l'aiguille fermement sur le dispositif de stylo injecteur par rotation dans le sens horaire (vissage) jusqu'à la butée.

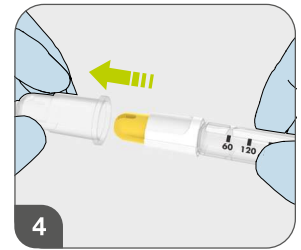


4 Retirer le capuchon de l'aiguille.

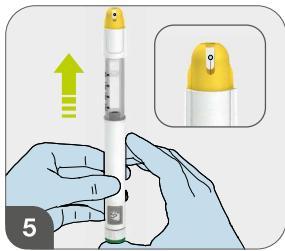


5 Purger le stylo injecteur conformément au mode d'emploi correspondant et régler la dose appropriée.

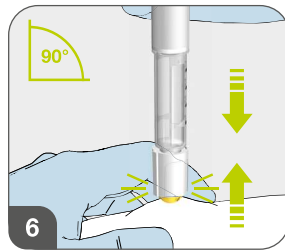


6 Injecter selon les instructions recommandées en formant ou non un pli de peau.

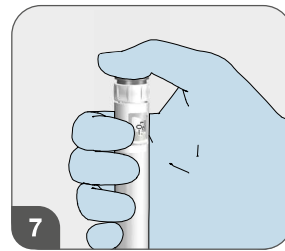


7 Maintenir l'injection pendant au moins 10 secondes avant de retirer le dispositif et compter lentement jusqu'à 10.

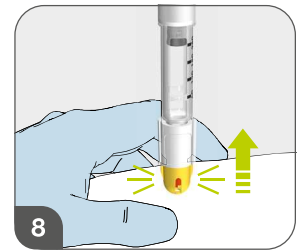

8 Retirer l'aiguille en la tirant verticalement hors du site d'injection.

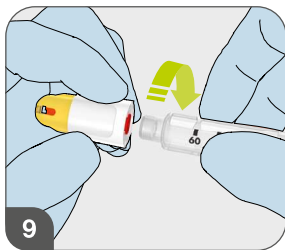

9 Retirer en effectuant une rotation antihoraire au stylo injecteur.

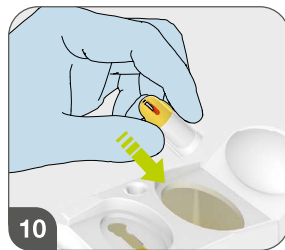

10 Éliminer dans un conteneur pour objets tranchants/piquant.



Lire le mode d'emploi pour la manipulation de l'aiguille pour stylos injecteurs et les informations de sécurité dans la rubrique Indications d'utilisation, section "Mise en garde".



Aiguille double sécurité pour stylos injecteurs mylife AutoProtect PRO

Compatible avec toutes les grandes marques de stylos injecteurs²

Les aiguilles double sécurité pour stylos injecteurs mylife AutoProtect PRO sont testées conformément à la norme ISO 11608-2:2012. Elles sont totalement fonctionnelles et sont plus sûres lorsqu'elles sont utilisées avec les stylos injecteurs mentionnés sur la boîte des aiguilles de sécurité pour stylos injecteurs mylife AutoProtect PRO. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant du stylo injecteur. Veuillez respecter le mode d'emploi de votre stylo injecteur avant d'utiliser une aiguille de sécurité pour stylos injecteurs mylife AutoProtect PRO.

Compatible avec les stylos injecteurs suivants
www.mtdglobal-mylife.com/pen-compatibility



Clause de non-responsabilité: mylife et AutoProtect sont des marques déposées.

¹ Aronson R, et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, *Clinical Therapeutics*, 35(7):923-933, 2013.

² Consulter la liste des stylos compatibles sur la boîte des aiguilles de sécurité pour stylos injecteurs mylife AutoProtect PRO ou sur le site Internet www.mylife-diabetescare.com.

³ Directive 2010/32/UE du Conseil- Prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire.

⁴ Tube de canule en acier inoxydable pour la fabrication des dispositifs médicaux – ISO 9626:2016.

⁵ K. Strauss and WISE Consensus Group: WISE recommendations to ensure the safety of injections in diabetes, *Diabetes & Metabolism*. 2012, 38, S2-S8, Supplement 1.



Diabetescare

**Liberté.
Confiance.
Avec mylife.**



Systèmes de perfusion



Lecteurs de glycémie



Gestion du traitement



Aiguilles pour stylo

Avec la marque mylife Diabetescare, MTD propose une gamme de produits et de services pour les personnes atteintes de diabète. Elle leur offre tout le nécessaire pour assurer un traitement autonome simple et discret. Avec mylife Diabetescare, le traitement autonome se présente comme une solution naturelle.

mylife™ est une marque sous licence pour les aiguilles de stylo et la mesure de la glycémie.

Allemagne, Autriche, Suisse

Medical Technology and Devices Germany GmbH

THE SQAIRE, Business Center 5th floor, Am Flughafen 12, 60549 Frankfurt am Main

CustomerService.DACH@groupmtd.com

www.mtdglobal-mylife.com



MTD
Medical Technology and Devices