



SafetyLancets



mylife™ SafetyLancets

Geringeres Risiko versehentlicher Nadelstichverletzungen bei der Entnahme von Kapillarblutproben

Das innovative patentierte Design der mylife™ SafetyLancets macht die Entnahme kapillarer Blutproben einfach und sicher. Die Einmal-Auslösefunktion und eine versiegelte Schutzkappe bieten Sicherheit und schützen Patienten wie auch medizinisches Fachpersonal vor Kreuzkontamination und Verletzungen. mylife™ SafetyLancets sind in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm) und mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm).

Sicherheitsmerkmale beider Produkte

- An der Sicherheitsversiegelung lässt sich erkennen, ob die mylife™ SafetyLancet noch unbenutzt ist
- Die Schutzkappe bewahrt die Sterilität und verhindert eine Kontaminierung vor dem Gebrauch
- Dank einmaliger Auslösefunktion nach Gebrauch nicht wiederverwendbar



mylife™ SafetyLancets
(28G/1,5 mm)


Komfortmerkmale beider Produkte

- Hohe Nadelqualität (dreifach angeschrägte Nadelspitze) unterstützt einen guten Blutfluss bei hohem Komfort
- Kein Laden oder Zusammensetzen vor dem Gebrauch erforderlich




mylife™ SafetyLancets
Comfort (30G/1,2 mm)


So verwenden Sie die mylife™ SafetyLancet

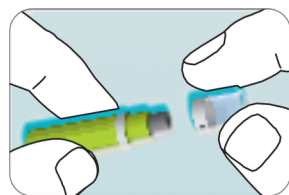

1 Einfach die Schutzkappe drehen und von der mylife™ SafetyLancet abziehen.

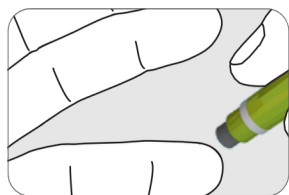

2 Die mylife™ SafetyLancet auf die Fingerkuppe aufsetzen.

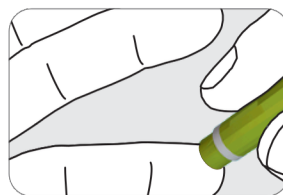

3 Die erhöhte Plattform fest gegen die gewählte Stelle drücken, um den Lanzettenmechanismus zu aktivieren.



4 Die Nadel springt sofort nach Gebrauch wieder zurück. Dank der einmaligen Auslösefunktion kann die mylife™ SafetyLancet nicht versehentlich wiederverwendet werden.



Mehr Freiheit. Mehr Lebensfreude. Mit mylife™.

Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch

MTD

Medical Technology and Devices



mylife™ SafetyLancets

Sterile Einmal-Sicherheitslanzetten zur sicheren und komfortablen Routineentnahme von medizinischen Blutproben

In Packungen zu je 200 Stück mit praktischem Schiebedeckel erhältlich



mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm)



mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm)

Zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels und für andere diagnostische Tests in

- Diabetes-Fachzentren
- Krankenhäusern
- der häuslichen Pflege
- Pflegeheimen
- Praxen

Sterilität bleibt 5 Jahre lang erhalten

- Sterilisiert durch Bestrahlung
- Sterilisierungsdosis nach ISO 11137 festgelegt

Gauge	Nadel-durchmesser	Einstichtiefe	Beschreibung	Menge	Best.-Nr.	PZN DE
28G	0,36 mm	1,5 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets	200 St.	700024003	9123827
30G	0,30 mm	1,2 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets Comfort	200 St.	700023989	11286117

mylife™ ist eine lizenzierte Marke für Pen-Nadeln und Blutzuckermessung

Kundenservice: CustomerService.DACH@groupmtd.com | +49 (0) 69 5095 1143
 Mehr Informationen unter <https://mtdglobal-mylife.com>
 Medical Technology and Devices Germany GmbH
 THE SQAIRE, Business Center 5th floor, Am Flughafen 12,
 60549 Frankfurt am Main



Medical Technology and Devices