



## mylife™ SafetyLancets

Geringeres Risiko versehentlicher Nadelstichverletzungen bei der Entnahme von Kapillarblutproben

**Das innovative patentierte Design der mylife™ SafetyLancets macht die Entnahme kapillarer Blutproben einfach und sicher. Die Einmal-Auslösefunktion und eine versiegelte Schutzkappe bieten Sicherheit und schützen Patienten wie auch medizinisches Fachpersonal vor Kreuzkontamination und Verletzungen. mylife™ SafetyLancets sind in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm) und mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm).**

### Sicherheitsmerkmale beider Produkte

- An der Sicherheitsversiegelung lässt sich erkennen, ob die mylife™ SafetyLancet noch unbenutzt ist
- Die Schutzkappe bewahrt die Sterilität und verhindert eine Kontaminierung vor dem Gebrauch
- Dank einmaliger Auslösefunktion nach Gebrauch nicht wiederverwendbar



mylife™ SafetyLancets  
(28G/1,5 mm)


### Komfortmerkmale beider Produkte

- Hohe Nadelqualität (dreifach angeschrägte Nadelspitze) unterstützt einen guten Blutfluss bei hohem Komfort
- Kein Laden oder Zusammensetzen vor dem Gebrauch erforderlich




mylife™ SafetyLancets Comfort  
(30G/1,2 mm)


### So verwenden Sie die mylife™ SafetyLancet

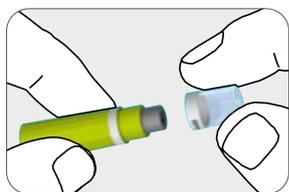


**1** Einfach die Schutzkappe drehen und von der mylife™ SafetyLancet abziehen.

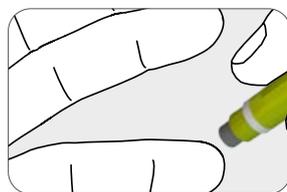

**2** Die mylife™ SafetyLancet auf die Fingerkuppe aufsetzen.

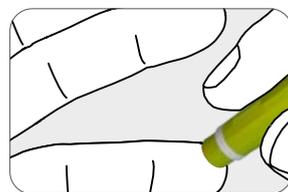

**3** Die erhöhte Plattform fest gegen die gewählte Stelle drücken, um den Lanzettenmechanismus zu aktivieren.

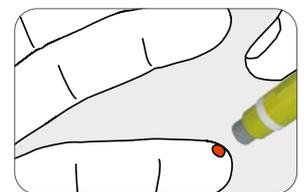

**4** Die Nadel springt sofort nach Gebrauch wieder zurück. Dank der einmaligen Auslösefunktion kann die mylife™ SafetyLancet nicht versehentlich wiederverwendet werden.



## mylife™ SafetyLancets

Sterile Einmal-Sicherheitslanzetten zur sicheren und komfortablen Routineentnahme von medizinischen Blutproben

In Packungen zu je 200 Stück mit praktischem Schiebedeckel erhältlich



mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm)



mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm)

### Zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels und für andere diagnostische Tests in

- Diabetes-Fachzentren
- Krankenhäusern
- der häuslichen Pflege
- Pflegeheimen
- Praxen

### Sterilität bleibt 5 Jahre lang erhalten

- Sterilisiert durch Bestrahlung
- Sterilisierungsdosis nach ISO 11137 festgelegt

Gauge	Nadel-durchmesser	Einstichtiefe	Beschreibung	Menge	Best.-Nr.	PZN AT
28G	0,36 mm	1,5 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets	200 St.	<b>7100031</b>	3943618
30G	0,30 mm	1,2 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets Comfort	200 St.	<b>700001495</b>	4355473

#### Österreich

Ypsomed GmbH // Am Euro Platz 2 // 1120 Wien //  
 service@ypsomed.at // www.mylife-diabetescare.at // kostenlose Service-Hotline: 00800 10033962

#### Schweiz

Ypsomed AG // Markt Schweiz // Weissensteinstrasse 26 // 4503 Solothurn //  
 info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch //  
 kostenlose Service-Hotline: 0800 44 11 44

Distributed by

**puras**

031 996 85 85  
 puras.ch

**YPSOMED**  
 SELF CARE SOLUTIONS